

品種

アドスプレー ロング/レギュラー
アドスプレー ロング/ミニ
アドスプレー ショート/レギュラー
アドスプレー ショート/ミニ

溶解水ボトル




溶解キット



スプレーヤーキット ロング




スプレーヤーキット ショート/開腹手術専用

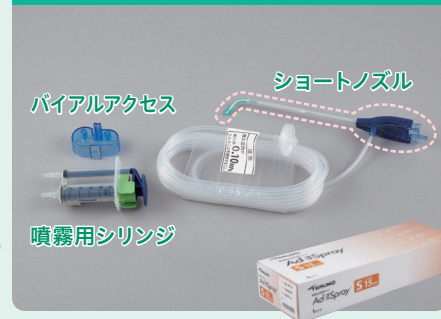


専用レギュレータ



ステップ 1 粉末の溶解

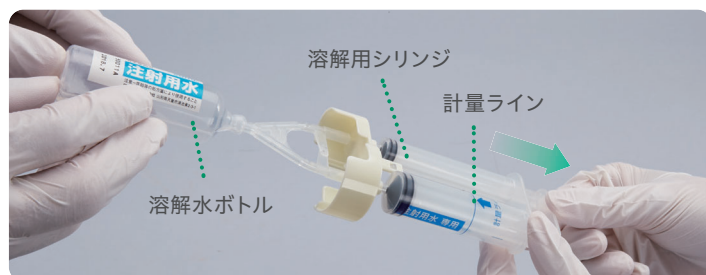

① **吸引** 器械出しの方が溶解用シリンジを持ち、外回りの方が溶解水ボトルを持ち接続。計量ラインよりも多めに溶解水を吸引する。

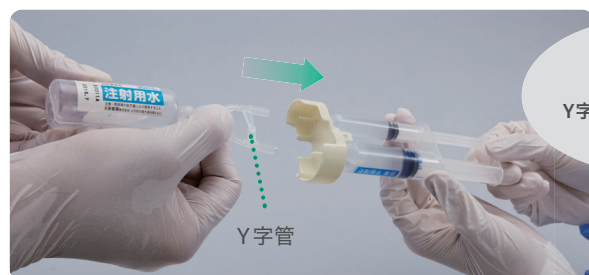

② **Y字管の取り外し** Y字管から溶解用シリンジをまっすぐに引き抜く。



③ **エア抜き** エア抜きを行い、計量ラインにガasketの上部を合わせて、溶解水を規定量に調整する。



④ **溶解水注入** 水平な場所にバイアルを置き、溶解用シリンジを垂直に接続する。



⑤ **溶解用シリンジの取り外し** バイアルを縦に保持したまま溶解用シリンジを外す。



⑥ **溶解** 直ちにバイアルを上下に30秒程激しく振り、粉末を溶解する。粉末のダマが残らずに十分に溶解していることを確認する。
(粉末溶解後は60分以内にご使用ください。)

ステップ 2 溶液の充填



⑦**バイアルアクセスの接続** 調整済みバイアルとバイアルアクセスの大きさを合わせ、カチッと音がするまで接続する。



⑧**噴霧用シリンジの接続** バイアルアクセスと噴霧用シリンジの大小の向きを合わせ接続する。



⑨**吸引** 緑色のストッパーをつまみながら押し子をまっすぐに引き、溶液をすべて吸引する。



⑩**バイアルアクセスの取り外し** 噴霧用シリンジをまっすぐに引き、バイアルアクセスから外す。



⑪**エア抜き** 滅菌ガーゼ等で溶液の漏れを抑えながら、エア抜きを行う。

ステップ 3 送気チューブの取り出し




⑫**送気チューブの取り出し** トレーから送気チューブを取り出し、器械出しの方はチューブ先端を外回りの方に渡す。




・外回りの方はチューブを受け取りたぐる。
・器械出しの方は清潔区域内で必要なチューブの長さを確保する。

ステップ 5 試し吹き

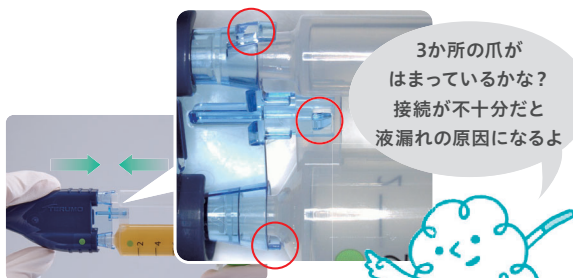


⑭**ノズルと噴霧用シリンジを接続** ノズルの先からガスが流れていることを確認し、ノズルと噴霧用シリンジの緑色のマークを合わせてまっすぐに接続する。

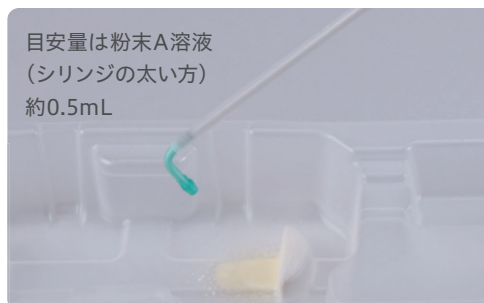

⑮**試し吹き** 使用直前にトレーやバット等に向け試し吹きを行い、溶液が白くゲル化することを確認する。

ステップ 4 ガス圧の調整

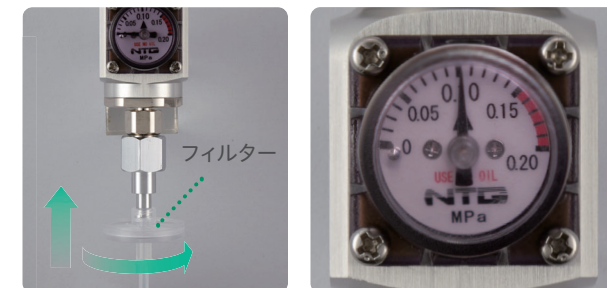

⑬**送気チューブの接続・ガス圧の調整** 外回りの方は、専用レギュレータが送気ガス供給装置（圧縮空気）のアウトレットに接続されていることを確認し、フィルターをコネクター部に接続する。調整ダイヤルを回し、ガス圧を0.10MPaに調整する。

本製品の詳細は電子添文をご参照ください


一般的名称：癒着防止吸収性バリア 販売名：アドスプレー
医療機器承認番号：22800BZX00234000
記載されている社名、各種名称は、テルモ株式会社および各社の商標または登録商標です。

テルモ株式会社 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1
©テルモ株式会社 2024年1月作成 23T587-1SZ10SZ2401

商品に関するお問い合わせは

テルモ・コールセンター
0120-12-8195
(9:00~17:45 土・日・祝日を除く)

腹腔鏡手術の場合

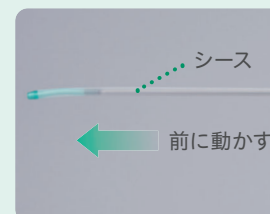

ノズルをトロッカーに挿入/抜去する際は、シースを先端方向にスライドし、スプレー先端をまっすぐに状態にする。